

medical line



ORLETT

Зарегистрировано в Росздравнадзоре

Инструкция по применению
ортопедических изделий

ОРТЕЗ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ И РУКУ (ОТВОДЯЩАЯ ШИНА)

SI-130



WWW.ORLETT.RU

СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Ортез ORLETT на плечевой сустав и руку (отводящая шина), арт. SI-130, обеспечивает фиксацию верхней конечности в плечевом суставе в положении отведения 15 градусов. Отпускается без рецепта.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- иммобилизация после травм плечевого пояса (в т.ч. вывихи, субкапитальные переломы плеча);
- иммобилизация плечевого пояса в послеоперационном периоде;
- иммобилизация при лечении воспалительно-дегенеративных заболеваний плечевого пояса.

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения ортеза назначает лечащий врач. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- индивидуальная непереносимость материалов изделия;
- гнойно-септические заболевания кожных покровов (в области применения ортеза);
- плечевой артродез;
- задняя нестабильность плечевого сустава.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

В случаях гнойных заболеваний и/или заболеваний кожи в области применения ортеза необходима консультация лечащего врача. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

КОНСТРУКЦИЯ

Ортез на плечевой сустав и руку (отводящая шина), арт. SI-130, состоит из следующих элементов (рис. 1):

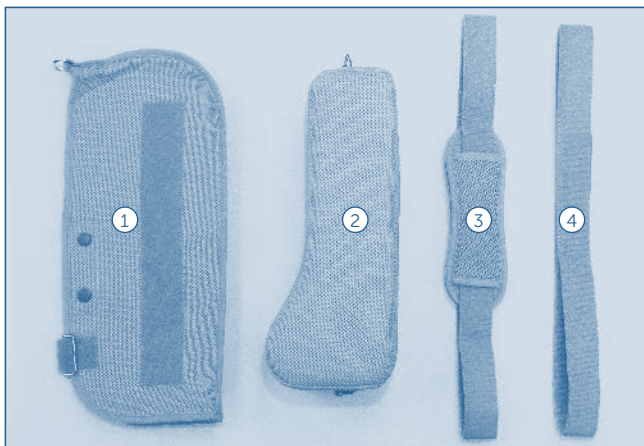


рис. 1

1. слинг; 2. подушка, обеспечивающая отведение; 3. наплечный ремень; 4. пояс для крепления ортеза на талии.

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

1. Зафиксировать на талии подушку, обеспечивающую отведение с помощью пояса. Подушка должна располагаться на стороне пораженной конечности застёжкой «Велкро» кнаружи. Застёжка «Велкро» необходима для дальнейшего крепления слинга (рис. 2).
 2. Поместить предплечье в слинг таким образом, чтобы локтевой сгиб полностью уперся в нижний край. Большой палец вставить в специальную петлю (при необходимости). Закрыть верхние крепления слинга.
 3. Свободный конец наплечного ремня вставить в крепления слинга, отрегулировать по длине и зафиксировать с помощью застёжки «Велкро».
- Далее прикрепить слинг к подушке с помощью застёжки «Велкро» (рис.3).

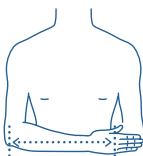


рис. 2



рис. 3

ПРАВИЛА ПОДБОРА



Для корректного подбора ортеза ORLETT, арт. SI-130, необходимо сантиметровой лентой измерить длину предплечья от вершины локтевого отростка до пястно-фалангового сустава V пальца.

Согласно полученным результатам подобрать ортез по таблице подбора размеров.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер	Длина предплечья, см
S	30-33
M	33-36
L	36-39
XL	более 39

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить ортез. Важно, чтобы ортез был удобен.

ПРАВИЛА УХОДА

Машинная стирка в деликатном режиме при температуре не выше 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено.

Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Для изделий со съёмными или отстёгивающимися каркасами, шинами, рёбрами жёсткости или шарнирами: отсоединять данные съёмные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия следует вернуть их обратно.



СОСТАВ

69% полиуретан, 10% нейлон, 20% полиэстер, 1% никель.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Ортез должен храниться в оригинальной упаковке при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен.

Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Ортез утилизировать с бытовым мусором.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие арт. SI-130, инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи ортеза при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____

Товар является медицинским изделием.

Изделия протезно-ортопедические: ортезы на верхние конечности, корсеты ортопедические, корректоры осанки, реклинаторы: на плечевой сустав и руку: арт. SI-130.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09549 от 17.12.2021 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «НИКАМЕД», Россия, 127015, Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД», тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

